

Low Profile Abutment Material, Description And Indications

ロープロファイル・アバットメントの種類および適用

Two-Piece Low Profile Abutments

Are designed for a single-unit restoration. These abutments have a hex at the base of the restorative platform for anti-rotation and engage the hex of the implant. Hexed restorative components are to be used with these abutments. However, these abutments may also be used with multi-unit restorations with non-hexed restorative components.

2ピース・ロープロファイル・アバットメント

シングルユニット補綴用。このアバットメントは、補綴プラットフォームの底部に回転防止として六角構造があり、インプラントの六角に嵌め合わされます。このアバットメントには、六角構造の補綴コンポーネントを使用しますが、六角構造がない補綴コンポーネントを用いたマルチユニット補綴とも使用可能です。

One-Piece Low Profile Abutments

Are designed to only be used for multiple-unit restorations. These do not have an anti-rotation feature at the base of the restorative platform and do not engage the hex of the implant. Non-hexed restorative components are used with these abutments.

1ピース・ロープロファイル・アバットメント

マルチユニット補綴専用。このアバットメントは、補綴プラットフォームの底部に回転防止機能がなく、インプラントの六角に嵌め合わされません。このアバットメントには、六角構造がない補綴コンポーネントを使用します。

Low Profile Angled Abutments

May be used for single and multiple-unit restorations and are available in 17 and 30 degree angles. These abutments have a hex at the base of the restorative platform for anti-rotation and engage the hex of the implant. Hexed and non-hexed restorative components can be used with these abutments.

ロープロファイル角度付きアバットメント

シングルユニット補綴、マルチユニット補綴のいずれにも使用可能。角度は、17度と30度のタイプがあります。このアバットメントには、補綴プラットフォームの底部に回転防止として六角構造があり、インプラントの六角に嵌め合わされます。このアバットメントは、六角構造がある補綴コンポーネントと六角構造がない補綴コンポーネントのいずれにも使用可能です。